

Respirátor 3M VFlex s filtrační účinností min. 80%

Rozdíl účinnosti respirátorů:

Účinnost respirátorů se měří podle účinnosti při filtraci částic o velikosti 0,3 mikrometrů, respirátor s třídou FFP1 odfiltruje minimálně 80% částic:


třída účinnosti respirátoru	minimální filtrační účinnost
FFP1	80%
FFP2	94%
FFP3	99%

U respirátoru třídy FFP1 výrobce 3M byla prokázána schopnost zachytit částice i menší než jsou viry. Respirátor není testován přímo proti virům.

Cena za kus 249 Kč / bez DPH

Cena za balení 3 735 Kč / bez DPH

Výrobce 3M, v balení naleznete 15 ks

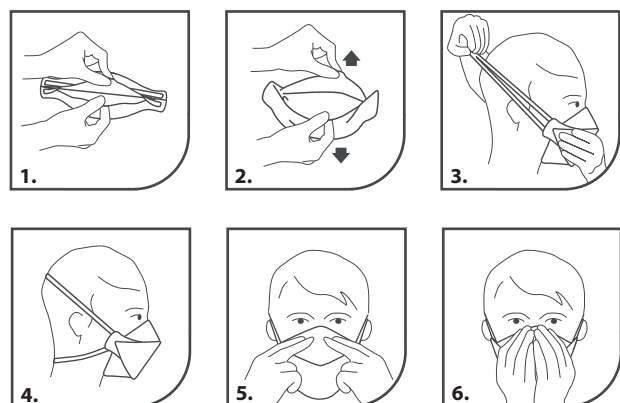

Pokyny pro nasazení

Před nasazením mějte vždy čisté ruce.

1. S rubovou stranou směřující nahoru použijte poutka k oddělení vrchního a spodního panelu a vytvoření mušlového tvaru. Nosní svorku ve středu mírně ohněte.
2. Ujistěte se, že oba panely jsou zcela rozložené.
3. Uchopte polomasku jednou rukou, otevřenou stranou směrem k obličeji. Druhou rukou uchopte oba pásky. Polomasku přidržíte pod bradou, nosní svorkou vzhůru, a přetáhněte pásky přes hlavu.
4. Vrchní pásek umístěte přes temeno hlavy a spodní pásek pod uši. Pásky nesmějí být zkroutené. Vrchní a spodní panel nastavte tak, aby pohodlně seděly, přičemž panely a poutko na bradě nesmějí být ohnuté dovnitř.
5. Za použití obou rukou vytvarujte nosní svorku podle spodní části nosu tak, aby byla polomaska správně a těsně nasazena. Použijete-li k vytvarování svorky pouze jednu ruku, může se snížit účinnost polomasky.
6. Před vstupem na pracoviště by měla být provedena zkouška těsnosti nasazení polomasky na obličeji.